



SE Bruksanvisning

Tack för ditt köp av EquiAlarm. Detta är en mycket driftsäker fölvtakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvtakten är monterad och drivs på rätt sätt för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Inhoud

1. Inledning	58
2. Paketets innehåll	58
3. Förbereda för användning	59
3.1 Första gången	59
3.2 Slå på/av	59
4. EquiAlarm indikatorer	60
4.1 Statusindikatorn	60
4.2 GSM indikator	60
5. Interiören i EquiAlarm	61
5.1 Sätta i/byta ut batterierna	61
5.2 EquiAlarm höljet	61
5.3 Sätta i SIM-kortet	61
6. Installera ett nytt SIM-kort	62
7. Programmera telefonnummer	62
7.1 Programmeringsläge	62
7.2 Programmera telefonnummer	63
7.2.1 Programmera genom att "SMS:a"	64
7.2.2 Direkt programmering	65
8. Testa	65
9. Montering på stoet	66
9.1 Montering under grimman	66
10. Sammanfattning och sätt att använda produkten	67
11. Teknisk information	67

1. Inledning

Naturligtvis vill du vara med när ditt sto är på väg att föla så att du kan hjälpa henne eller kalla till en veterinär om det uppstår några komplikationer. Hästar och ponnyer tenderar att ligga ner, utsträckta på sin vänstra eller högra flank under fölning. Det ger dem mer utrymme under värkarna. EquiAlarm är ett smart hjälpmedel för detta fenomen. Genom att helt enkelt montera EquiAlarm under grimman på ditt sto (eller i en anti-rull gjord), kommer det att larma dig när fölningen börjar.

2. Paketets innehåll

1. **EquiAlarm sändare.**
2. Den speciella hållaren. (EquiAlarm är placerad i denna). Hållaren kan placeras under grimman på ditt sto, eller i en anti-rull gjord.
3. **Buntband.** För att hjälpa dig komma igång har vi skickat med ett antal buntband. Dessa buntband är avsedda för engångsbruk, men kan lätt köpas i vilken affär som helst.
4. **Speciell skruvmejsel.** För det första kan denna användas för att skruva loss och öppna din EquiAlarm (till exempel när batterierna behöver bytas eller när du behöver infoga/ta bort SIM-kortet). Baksidan av denna skruvmejsel innehåller en stark magnet. Du kan använda denna för att sköta EquiAlarm.
5. **Dokumentation.** Du hittar 2 dokument bilagda med din EquiAlarm, nämligen:
 - a. **Quick-Start Guide** (kort, koncis manual)
 - b. **TroubleShooter** (En checklista att använda om du får problem med EquiAlarm en så kallad felsökning)



3. Förbereda för användning

3.1 Första gången

Följande steg måste utföras när du använder EquiAlarm för första gången:

- Skruva loss EquiAlarm och ta bort den röda etiketten från polen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt med EquiAlarm.
- Köp ett SIM-kort, aktivera SIM-kortet och sätt det i SIM-korthållaren (se 5.3)
- Avsnittet "Installera ett nytt SIM-kort" (se 6) förklarar hur du kan ställa in och installera ett nyinköpt SIM-kort själva.

När du har utfört dessa steg på din nya EquiAlarm, kan du försluta den med skruvarna och fortsätta med installeringen.


Om din egen mobiltelefon har bra täckning i stallet eller hagen där ditt sto befinner sig rekommenderar vi att du köper ett SIM-kort från samma operatör.

3.2 Slå på/av

EquiAlarm kan slås på/av och drivas genom användandet av den bakre delen av den speciella skruvmejseln som följer med.

För att slå PÅ EquiAlarm måste du göra så här:




- Håll den bakre delen av skruvmejseln mot  symbolen på sidan av EquiAlarm.
- Du kommer att se statusindikatorn lysa grönt. Du kan nu ta bort skruvmejseln.



- EquiAlarm är nu aktiv och redo att placeras på ditt sto.

För att slå AV EquiAlarm, måste du göra så här:



- Håll den bakre delen av skruvmejseln mot  symbolen på sidan av EquiAlarm igen.
- Du kommer att se statusindikatorn lysa grönt. Du kan nu ta bort skruvmejseln.
- Nu är EquiAlarm avstängd.

4. EquiAlarm indikatorer

4. EquiAlarm indikatorer



Statusindikatorn är det yttersta ljuset på sidan av EquiAlarm. Statusindikatorn är ett speciellt ljus som kan lysa upp i 3 olika färger: blått, grönt och rött. Du kan läsa av statusen för EquiAlarm via statusindikatorns blinksekvens. Till exempel, om lampan blinkar grönt är EquiAlarm OK. När lampan blinkar rött är det tvärtom, då behöver batterierna bytas ut.

Statusindikatorn visar också ytterligare information när EquiAlarm ringer upp. Om lampan blinkar blått och rött växelvis innebär det att anslutningen är dålig. Om lampan blinkar gult/blått eller grönt/blått är anslutningen rimlig eller bra! Du kan läsa vad

ljusmönstret innebär i nedan tabell.

LED-ljus monster			Betyder
●	●	●	Stand-by, batteri OK
●	●	●	Stand-by, batteri lågt
●●	●●	●●	GSM aktiv, etablerar en anslutning
●●	●●	●●	GSM aktiv, nätverksanslutningen är dålig
●●	●●	●●	GSM aktiv, nätverksanslutningen är rimlig
●●	●●	●●	GSM aktiv, nätverksanslutningen är bra

Fig1. : Standard ljus mönster av statusindikatorn

4.2 GSM indikator



Parallellt med statusindikatorn på sidan av EquiAlarm, hittar du också en lampa med inskriptionen "GSM". Denna indikator lyser bara gult. Den är direkt kopplad till EquiAlarm's interna GSM och kommer bara att lysa när det interna GSM:et är aktivt.

Det finns, sammanfattningsvis, 3 möjliga situationer när det gäller GSM indikatorn:


- GSM söker en nätverksanslutning (blinkar snabbt)
- GSM har en nätverksanslutning (blinkar långsamt)
- GSM ringer upp (lampan är tänd hela tiden under uppringningen)

GSM indikatorn är endast ett stöd. I allmänhet kommer du oftast att använda statusindikatorn.

5. Interiören i EquiAlarm

När du öppnar EquiAlarm, kommer du att se följande huvudkomponenter:

1. Batterier
2. SIM-kort/SIM-korthållare
3. Statusindikator
4. GSM indikator

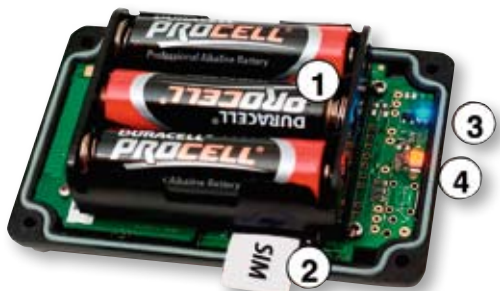

5.1 Sätta i/byta ut batterierna

Vid byte av batterier i EquiAlarm, skall du alltid använda alkaliska batterier ("Duracell" eller "Panasonic"). Användning av uppladdningsbara batterier rekommenderas inte. Byt alltid ut alla 3 batterierna samtidigt! En liten skruvmejsel kan användas för att försiktigt ta ut batterierna, om du inte kan göra det med fingrarna. Batterierna måste sättas i så den negative polen på batteriet placeras på fjädern.

Installera nya batterier vid början av följningssäsongen!

När du inte använder EquiAlarm under en längre period, till exempel efter följningssäsongen är det lämpligt att ta bort batterierna för att förhindra skador på EquiAlarm som en följd av läckage

5.2 EquiAlarm höljet

Höljet till EquiAlarm har utformats så att det bara kan skruvas ihop på ett sätt. Detta säkerställer att status och GSM indikatorerna är synliga.

5.3 Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet måste placeras i EquiAlarm med chippet nedåt. OBS! Kontrollera även den diagonala sidan på SIM-kortet. Denna bör vara på framsidan när SIM-kortet är isatt.

För SIM-kortet i hållaren tills du hör ett klick. Du kan sedan släppa SIM-kortet. SIM-kortet sitter nu i hållaren och EquiAlarm är klar för användning. När du vill ta bort SIM-kortet från hållaren trycker du försiktigt på SIM-kortet tills du hör ett klick. Om du nu släpper SIM-kortet kommer SIM-kortet att komma fram så att du enkelt kan ta bort det.



6. Installera ett nytt SIM-kort

Köp ett kontantkort från din mobil specialist. Du ska helst välja en operatör som du vet ger bra täckning på den plats där du vill använda EquiAlarm.

När du har köpt ett SIM-kort måste du aktivera det. Du gör så här:

- Sätt in det nyinköpta SIM-kortet i din egen telefon.
- Om din telefon frågar efter en PIN-kod efter att du satt igång den, slå in koden. PIN-koden finns i häftet eller skrivelsen som medföljer SIM-kortet. I de flesta fall är PIN-koden „0000“.
- Försök nu att ringa ett samtal med telefonen. Du kan höra någon form av välkomstmeddelande från din operatör innan telefonen kopplar samtalet, eftersom det är första gången du använder SIM-kortet lyssna på meddelandet i sin helhet.
- Du måste nu kontrollera om röstbrevlådan för SIM-kortet är avstängd. Du kan göra det genom att ringa numret på SIM-kortet från en annan telefon. Om det efter ett tag, är så att du överförs till en röstbrevlåda, innebär det att röstbrevlådan för SIM-kortet är påslagen. Om så är fallet, måste du inaktivera röstbrevlådan personligen genom att ringa operatörens kundtjänst, eller genom att mata in en viss avaktiveringskod. Förfarandet är olika för varje operatör och anges i instruktionerna för SIM-kortet.
- Om du uppmanas att mata in en PIN-kod när du slår på telefonen, måste denna PIN säkerhetsfunktion stängas av. Konsultera manualen för din telefon för instruktioner om hur du gör detta.
- Kontrollera hur mycket kredit det är på SIM-kortet. Du kan göra detta genom att ringa upp din operatörs service-nummer för detta ändamål. Kontrollera att det finns minst 100:-- på kortet. Om kreditbeloppet är otillräckligt måste du ladda upp det med mer kredit.


När du har utfört alla dessa steg kommer det nya SIM-kortet vara redo för installation och användning i EquiAlarm. (se 5.3)

7. Programmera telefonnummer

För att ändra inställningarna för din EquiAlarm måste du försätta den i programmeringsläge.

7.1 Programmeringsläge

För att programmera EquiAlarm direkt, måste du göra följande:

- Håll den bakre änden av skruvmejseln mot  symbolen på sidan i flera sekunder
- Under tiden du gör detta kommer LED lampan att först blinka grönt 3 gånger och sedan blått.
- När lysdioden lyser blått kan du ta bort skruvmejseln.
- Nu är EquiAlarm i programmeringsläge.

När du är klar med programmeringen vänta 2-3 minuter, EquiAlarm kommer automatiskt att lämna programmeringsläget och återgå till normal status. EquiAlarm är nu klar för användning.

7.2 Programmera telefonnummer







- Aktivera EquiAlarm's "Programmeringsläge" (se 7.1). Vänta tills statuslampan blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Ring upp EquiAlarm med din (helst mobil) telefon.
- EquiAlarm kommer nu att få ditt samtal och programmera ditt telefonnummer i minnet.
- EquiAlarm kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa (d.v.s. svara inte och koppla inte ifrån).

Nu är du klar med programmeringen. EquiAlarm har dina nummer och kommer att ringa dig när det är dags för fölning. Vänta 2-3 minuter. EquiAlarm lämnar automatiskt programmeringsläget. EquiAlarm är klar att använda.

Om du vill förprogrammera ytterligare ett telefonnummer, följer du stegen nedan.

- Vänta tills EquiAlarm blinkar 1 x blå, 2x grön.
- Ring nu upp EquiAlarm med den 2:a telefonen som du vill bli uppringd på (till exempel din fasta telefon).
- EquiAlarm kommer också att få detta samtal och kommer att programmera detta telefonnummer i minnet.
- EquiAlarm kommer också att ringa dig på denna telefon för att bekräfta numret. Låt din telefon ringa, svara inte.

Fig2: statusindikatorns ljusmönster under programmering

LED-ljus mönster			Betyder
			EquiAlarm är redo för det första samtalet
			EquiAlarm är redo för det andra samtalet

Du kan bestämma vilket telefonnummer du programmerar genom antalet gröna blinkningar på EquiAlarm. Till exempel visar 1 x blå och 2 x grön att du programmerar det andra telefonnumret.

7.2.1 Programmera genom att "SMS:a"

Du kan även programmera EquiAlarm genom att skicka ett SMS. För att göra detta bör du göra följande:

- På din egen mobiltelefon skriver du ett SMS med följande text: "M1:" (OBS! Använd stor bokstav M) omedelbart följt av det första numret du vill skall bli uppringt. Tabellen nedan visar ett exempel på hur ett SMS skall skrivas i ditt land.

Land	Landskod	Exempel mobil nummer:	Exempel på hur ett SMS skall se ut: (OBS! Skriv stor bokstav "M" och allt i en följd, utan mellanslag)
Holland (NL)	+31	0 6 12345678	M1:+31612345678
Belgien (BE)	+32	0 491 123456	M1:+32491123456
Frankrike (FR)	+33	0 6 12345678	M1:+33612345678
Schweiz (CH)	+41	0 176 12345678	M1:+4117612345678
Österrike (AT)	+43	0 664 1234567	M1:+436641234567
England (UK)	+44	0 7788 123456	M1:+447788123456
Sverige (SE)	+46	0 707 123456	M1:+46707123456
Tyskland (DE)	+49	0 171 1234567	M1:+491711234567

Som framgår av tabellen bör numret programmeras med hjälp av landsnumret istället för den första 0:an som normalt skulle ha ingått i mobiltelefonnumret.

- Aktivera EquiAlarm's "Programmeringsläge" (se 7.1). Vänta tills statusindikatorn blinkar 1 x blå, 1 x grön växelvis.
- Skicka nu SMS:et som du skrivit till EquiAlarm's mobiltelefonnummer.
- Du kommer snart att få status SMS från EquiAlarm som bekräftelse. Detta kommer att visa numret du har programmerat föregånget med M1:

Du kan naturligtvis även programmera M2 med samma metod. Du kan även, lätt programmera båda numren samtidigt i ett enda SMS. Du börjar helt enkelt med en ny rad för det andra numret i ditt SMS meddelande.

Vi rekommenderar att du programmerar ett mobiltelefonnummer som det första numret (M1). Om du gör det kan EquiAlarm skicka dig ett SMS och även ta emot SMS från dig.

Du kan även programmera numren via SMS när du testar EquiAlarm (se 8). När GSM indikatorn på EquiAlarm blinkar stadigt, kan du skicka ett SMS med telefonnummer eller nya inställningar och EquiAlarm kan bearbeta dessa.

7.2.2 Direkt programmering

Det finns alltid möjlighet att programmera EquiAlarm genom att tillfälligt sätta i EquiAlarm's SIM-kort i din eller någon annans mobiltelefon och spara numren på SIM-kortet via telefonen i fråga. Detta är dock oftast den mest komplexa metoden. För att kunna programmera SIM-kortet direkt bör du göra följande:

- Ta ut SIM-kortet ur EquiAlarm's SIM-korthållare. (se 5.3)
- Placera SIM-kortet i en annan mobiltelefon.
- Sätt på mobiltelefonen.
- Programmera namnen M1 och M2 till minnesplatserna 11 och 12 på SIM-kortet. Du hittar förfarandet för att göra detta i manualen för mobiltelefonen. Var noga med att se till att du inte programmerar numren i telefonens huvudminne.
- Programmera båda numren på SIM-kortet. Om du inte vill att en av minnesplatserna rings spara det som telefonnummer: "+1111".

8. Testa

Innan du börjar använda EquiAlarm, är det viktigt att du först testar den för att se till att den fungerar korrekt. Du kan enkelt testa larmet själv.

- Besök helst platsen där ditt sto är tillsammans med EquiAlarm.
- Ta EquiAlarm i händerna och sätt igång den så att statusindikatorn blinkar grönt en gång var 8:e sekund.
- Vrid nu EquiAlarm 90 grader så att statusindikatorn är vänd uppåt.
- Statusindikatorn blinkar nu snabbare och blir orange.
- Efter några sekunder blir indikatorn blå och GSM-lampan lyser också.
- EquiAlarm kommer nu inom kort att börja slå numret som är programmerat under "M1"
- Svara inte på detta samtal och likaså tryck inte bort samtalet genom att trycka på den röda knappen. Bara låt telefonen ringa ut.
- EquiAlarm upphör ringa automatiskt efter några sekunder.
- Du kan nu stoppa EquiAlarm genom att helt enkelt ringa upp den. EquiAlarm svarar på dina samtal och du kommer att höra 3 toner som bekräftelse på att du inaktiverat EquiAlarm. EquiAlarm ringer sedan inte upp några ytterligare telefonnummer förrän det åter vänds till 90 grader efter några minuter.

Om testet visar sig vara framgångsrikt kan du nu installera EquiAlarm på ditt sto.

Om du stöter på problem vänligen använd den bifogade Felsökningslista.

Du kan spara EquiAlarm's nummer i din telefon genom att döpa det till exempel till "Sto" eller "Fölning". Nu kan du se när EquiAlarm ringer upp.

När EquiAlarm ringer dig – svara aldrig (oavsett det är fölning eller programmering). När du svarar registreras det som ett samtal och du får betala för det. Tryck aldrig bort samtalet (med den röda knappen) i heller eftersom samtalet då kanske hamnar i din röstbrevlåda.

9. Montering på stoet

För att kunna använda EquiAlarm i en gjord eller under grimman måste den fästas i den medföljande hållaren. Du kan göra detta på följande sätt:

- Skjut in EquiAlarm i hållaren försiktigt, som visas i bilden nedan.
- Kontrollera att båda indikatorerna är synliga på sidan.
- Avsluta med att stänga luckan med klämman som tillhandahålls.



9.1 Montering under grimman



Om du vill använda Bith Alarm Lite under en grimma bör den monteras enligt nedan, med 3 buntband.

10. Sammanfattning och sätt att använda produkten

Nedan följer en kort beskrivning av hur EquiAlarm fungerar och hur den ska användas. Vi råder dig att läsa denna text.

EquiAlarm kontrollerar ditt stors position var 8:e sekund. Under intervall kommer EquiAlarm att byta till ett energieffektivt läge så att batteriet inte används. När ditt sto börjar få värkar och lägger sig helt i sidoläge kommer EquiAlarm att ringa din mobiltelefon. Telefonnummer till EquiAlarm kommer då att visas på skärmen på din mobiltelefon. Om du lagrar numret i kontaktlistan i din mobiltelefon med ett namn som "EquiAlarm" eller "Sto" kommer detta namn också att visas på skärmen på din telefon. Du kommer nu att veta att EquiAlarm ringer dig. I motsats till vad man normalt skulle göra svarar du inte i telefonen (och du trycker inte bort samtalet) i detta fall. Detta kommer att säkerställa att du inte startar en "konversation" och därmed är larmet helt gratis. Efter några sekunder kommer EquiAlarm sluta ringa automatiskt. Du kan sedan ringa upp EquiAlarm (detta är också gratis). Detta kommer låta EquiAlarm veta att du har hört larmet och enheten slutar ringa. EquiAlarm kommer bara återaktiveras om hästen lägger sig ner igen.

Om du inte ringer upp EquiAlarm inom cirka en minut kommer EquiAlarm ringa upp det andra numret i minnet (om ett andra nummer har programmerats) och sedan åter vänta ungefär en minut för bekräftelse. Om EquiAlarm har ringt varje nummer en gång utan att något av numren har svarat kommer EquiAlarm ringa det första numret igen och sedan det andra numret. Därefter kommer EquiAlarm automatiskt att upphöra att ringa.

Det bör noteras att ringa en fast telefonanslutning (din hemtelefon till exempel) även fungerar för EquiAlarm. Om din fasta telefon är utrustad med nummerpresentatör (måste vara aktiverat) kan du se i förväg om det är EquiAlarm som ringer dig. Om du inte har aktiverat nummerpresentatören måste du besvara varje samtal. I sådana fall kommer du att höra ett pip som gör att du kan identifiera EquiAlarm. I detta fall kommer det att anses som en "konversation" med EquiAlarm och en liten summa kommer att dras från kontantkortet i EquiAlarm. Vi rekommenderar att du kontrollerar krediten regelbundet om du skulle vilja använda EquiAlarm på detta sätt. Kontrollera att det fortfarande finns cirka 100:-- kvar.

Systemet kan i allmänhet verka under minst en månad på en uppsättning alkaliska batterier. Vi avråder bestämt från användning av laddningsbara eller billigare zink-kol-batterier.

11. Teknisk information

Matningsspänning	4.5V (3xAA Alkaline)
Strömförbrukning	130uA genomsnitt (1.3A peak)
GSM-modul	Dual band GSM-900/1800 MHZ
Minnesplatser	2
Viloläge	Nej
Detektionsvinkel	Justerbar 65-80°
Larmtyper	Telefonsamtal/SMS

Garantibevis

På grundval av våra allmänna affärsvillkor, lämnar vi 2 ÅRS GARANTI för denna apparat, för skador som härör från material-eller tillverkningsfel. Garanti-tiden startar från inköpsdatum. Garantin omfattar inte:

1. Skador, som uppkommit genom naturlig förslitning (slitdelar, glydytor), överbelastning och olämplig användning (ouppmärksamhet av bruksanvisningen).
2. Skador som uppstått genom våld eller vid transport.
3. Skador på gummidelar, som t ex anslutningskablar. Garantireparationer kommer att utföras endast vid tillverkarens anläggning eller hos auktoriserad verkstad! Tillverkaren reserverar sig rätten, vid försummelse, att avvisa garantikrav.

Apparaten ska för denna avsikt, på ägarens risk, monterad, förpackad och portofritt, återsändas till försäljningsstället tillsammans med originalfakturan och garantibeviset. Så precisa uppgifter som möjligt angående klagomålet är önskvärda. Kostnader i samband med omotiverade klagomål, åligger apparatens ägare.

SV Kortfattade handledning

Denna kortfattade handledning hjälper att snabbt komma igång med din EquiAlarm. Denna Quick-Start Guide innehåller korta hänvisningar till den omfattande manualen som kan laddas ner via var hemsida <http://www.kerbl.com>. Dessa referenser har följande format: "(se §2.3)"

Första användningen


(utförs 1:a gången efter köpet)

1. Skruva av EquiAlarm och ta bort den röda etiketten från pollen på batteriet. Batterierna är nu i kontakt med EquiAlarm.
2. Köp ett SIM-kort, aktivera SIM-kortet och sätt det i SIM-korthållaren. (se § 5.3)

När du har utfört dessa steg på din nya EquiAlarm kan du försluta den med skruvar och fortsätta med inställningarna.

Kom igång snabbt

Programmering:

1. Ta EquiAlarm ur kåpan och ta tag i den speciella skruvmejseln.
2. Håll den bakre delen av skruvmejseln mot den röda rutan bredvid  symbolen i några sekunder. (se § 3.2)
3. När du gör detta kommer statusindikatorn blinka grönt 3 gånger, sedan blått. När statusindikatorn är blå kan du ta bort skruvmejseln. (EquiAlarm är nu i programmeringsläge) (se § 7.1)
4. EquiAlarm kommer nu att ansluta till operatören. (Om du har installerat ett nytt SIM-kort kan EquiAlarm utföra ett antal engångs konfigurationer. Detta kan ta flera minuter.)
5. När EquiAlarm har upprättat en anslutning till operatören kommer statusindikatorn att blinka 1 x blått och 1 x grönt växelvis.
6. Ring nu upp EquiAlarm med din egen (helst mobil) telefon. Telefonnummer till EquiAlarm hittar du på kortet eller etiketten på det förutbetalda paketet som du köpt eller som följde med EquiAlarm. (se § 7.2.1)

(OBS! Din mobiltelefons nummerpresentatör måste vara påslagen. Detta innebär att när du ringer någon måste mottagaren kunna se ditt telefonnummer på skärmen på sin telefon. Om det behövs, kontrollera i manualen för din mobiltelefon.)

7. EquiAlarm kommer att få ditt samtal och lagra det i sitt minne.

8. EquiAlarm kommer nu att ringa tillbaka för att bekräfta numret. Du behöver **inte** svara!

9. EquiAlarm är nu programmerad för användning! Efter några sekunder kommer statusindikatorn växelvis blinka mellan 1 x blått och 2 x grönt. (Du har nu möjlighet att programmera en andra nummer med samma metod. Det finns två alternativa metoder för programmering av SIM-kortet. Dessa är via SMS eller direkt programmering på en annan mobiltelefon.)

10. När du är färdig med programmeringen, vänta ungefär 2 minuter tills EquiAlarm automatiskt lämnar programmeringsläget och återvänder till normal status. (När status är normal, kommer statusindikatorn att blinka en gång kort var 8:e sekund.)

Testa:

1. Sätt igång EquiAlarm (se § 10) och vrid därefter EquiAlarm tills den är i vertikalt läge.
2. Vänta i flera sekunder tills GSM indikatorn börjar blinka.
3. EquiAlarm kommer att ringa dig om en stund. Låt din telefon (mobil) ringa ut.

Installation:

1. Kontrollera alltid att EquiAlarm fungerar innan användning. (se § 10)
2. Sätt igång EquiAlarm. (se § 3.2)
3. Placera EquiAlarm i den medföljande hållaren och stäng med klämman (se § 11) (Du kan enkelt växla EquiAlarm på och av samtidigt som den är i hållaren).
4. Installera hållaren under grimman eller om så önskas i bröstbälte.
5. Om du installerar EquiAlarm under stoets grimma är det viktigt att hållaren är säkrad rimligen tätt under hakan. (När stoet håller sitt huvud upprätt bör EquiAlarm hänga i ett horisontellt läge)

Underhåll:

1. Kontrollera att batterinivån är tillräcklig ibland, när du besöker ditt sto. Du kan göra det snabbt genom att kontrollera färgen på statusindikatorn. Denna ska blinka grönt en gång var 8:e sekund. Om du ser en röd blink också är det dags att byta batterierna. (Ersätt alltid alla 3 batterierna samtidigt. Uppladdningsbara batterier ska inte användas!)
2. Kontrollera kredit på SIM-kortet ibland. Du gör det genom att ta ut SIM-kortet från EquiAlarm och placera det i din egen mobiltelefon. Därefter ringer du upp din operators servicenummer och följer instruktionerna.

Felsökningslista

EquiAlarm gör ingenting alls:

- Tomma batterier/Låg batterinivå?
 - » Installera nya batterier varje säsong. Byt alltid ut alla 3 batterierna samtidigt. Om du till exempel sätter i 2 nya batterier och låter 1 gammalt sitta kvar försämrar detta kraftigt driften (se § 5.1)
- Batterier rätt installerade?
 - » Batterierna skall installeras enligt illustrationen i botten på batterihållaren. Minus polen "-" är alltid placerad på fjädern. (se § 5.1)
- Är höljet korrekt monterad på EquiAlarm?
 - » Höljet till EquiAlarm kan bara monteras på ett sätt. Höljet placeras ovanför ljusdioderna så att det färgade ljuset från GSM och Statusindikatorn syns. (se § 5.2)

EquiAlarm kan inte etablera en nätverksanslutning (d.v.s. GSM indikator fortsätter att blinka snabbt och Statusindikatorn blinkar bara blått).

- Har SIM-kortet ställts in så att PIN kod behövs vid start?
 - » När du sätter i SIM-kortet i din egen telefon och slår på den skall telefonen inte fråga efter PIN kod. Om den gör det måste den funktionen **avaktiveras**. (Inställning av PIN kod till "0000" är inte tillräckligt! PIN kodens säkerhetsfunktion måste vara helt avstängd.) Konsultera manualen för din mobiltelefon för instruktioner om hur du gör detta. Om det inte är möjligt att avaktivera SIM-lås funktionen i din telefon

kommer du inte att kunna utföra detta steg av förfarandet. Du måste därför använda en telefon som inte har ett SIM-lås eller besöka en telefonbutik för att få funktionen avaktiverad.

- Har SIM-kortet aktiverats?
 - » När du använder ett nytt SIM-kort för första gången måste du använda det för att göra ett samtal på din egen telefon. För att göra detta måste du sätta i SIM-kortet i din egen telefon och sedan försöka ringa ett annat telefonnummer med hjälp av din telefon. (se § 6)
- Har SIM-kortet gått ut (i datum)?
 - » Om du inte använder SIM-kortet under en period av sex månader eller ett år, kan det vara så att operatören har blockerat SIM-kortet. Du kommer då att behöva köpa ett nytt SIM-kort. Se SIM-kortets leverantör för exakta villkor.
- Har SIM-kortet placerats rätt i hållaren?
 - » SIM-kortet passar endast i EquiAlarm på ett sätt. Kontrollera om det är korrekt isatt. (se § 5.3)
- Kan du ringa med SIM-kort som används?
 - » Kontrollera om du kan ansluta till GSM-nätet med din egen telefon och kontrollera även om du kan ringa ett samtal. Om operatörens täckning inte är tillräcklig är det möjligt att du kan behöva välja en annan operatör.

EquiAlarm upprättar en anslutning till GSM-nätet men ringer inte upp när den testas.

- Har telefonnummer programmerats korrekt på SIM-kortet?
 - » Numren måste programmeras på kortplatserna 11 och 12 på SIM-kortet. Om du har installerat ett nytt SIM-kort måste du växla EquiAlarm till programmeringsläge och sedan (när statusindikator blinkar blått/grönt) ringa den. EquiAlarm kommer då automatiskt skapa minnesplatser på SIM-kortet och spara numret i den första av dessa.
- Kan din egen telefon nås?
 - » Försök att ringa upp din egen telefon med en annan.
- Får du ett meddelande från operatören innan samtalet?
 - » När din kredit är slut eller nästan har löpt ut kan samtalet föregås av ett automatiskt meddelande från din operatör, som får till följd att samtalet i slutändan inte överförs till din telefon (eller endast mycket kortfattat). Fyll din kredit med hjälp av kontantkort eller voucher, de finns på de flesta stormarknader etc. Du kan testa detta genom att sätta i SIM-kortet i din egen telefon och ringa ett slumpmässigt valt nummer. Du bör då lyssna för att höra om du hör ett automatiskt meddelande innan samtalet kopplas.
- Finns det tillräckligt med kredit?
 - » Om krediten är mycket låg eller har blivit fullt utnyttjad kan inga samtal göras. Fyll din kredit med hjälp av ett kontantkort eller voucher som finns på de flesta stormarknader etc.

Jag kan inte stänga av EquiAlarm genom att returnera ett samtal.

- Är röstbrevlådan för EquiAlarm's SIM-kort avstängd?
 - » Om röstbrevlådan för SIM-kortet är påslagen är det möjligt att denna kommer att aktiveras innan EquiAlarm har kunnat svara själv. Du måste stänga av röstbrevlådan på EquiAlarm's SIM-kort. Instruktioner för detta finns i operatörens manual för SIM-kortet du köpt.
- Det är möjligt att EquiAlarm var upptagen med att ringa dig eller ett annat telefonnummer på SIM-kortet.
 - » Om du har väntat lite innan du ringt tillbaka är det möjligt att EquiAlarm var upptagen med att ringa ett nytt samtal. I så fall är EquiAlarm oförmögen att ta emot inkommande samtal.
- Det är möjligt att du tryckt bort samtalet med den röda knappen på din mobil och ringt tillbaka direkt efter.
 - » Tryck aldrig bort ett inkommande samtal från EquiAlarm med den röda knappen. Låt telefonen ringa ut och svara aldrig! Först då kan du ringa tillbaka.

Jag har placerat EquiAlarm på sidan för att testa den, men den ringer ändå inte.

- Har EquiAlarm precis larmat?
 - » Om du testat EquiAlarm och har ringt tillbaka för att avaktivera den måste den åter placeras på sidan i ungefär en minut innan den larmar igen. Detta förhindrar EquiAlarm från att fortsätta ringa efter att nyss blivit avaktiverad.

Det tog några minuter innan jag blev uppringd första gången.

- Har du precis ändrat nummer på SIM-kortet eller har du installerat ett nytt SIM-kort?
 - » Om du har programmerat SIM-kortet manuellt och inte har gjort det korrekt kommer EquiAlarm själv att försöka lagra numren på SIM-kortet korrekt. Samtalet kommer att överföras till din telefon snabbare nästa gång.
- Har du installerat ett nytt SIM-kort och glömt ta bort PIN koden?
 - » Om du inte har avaktiverat PIN kodsbegäran på SIM-kortet kommer EquiAlarm själv att försöka avaktivera PIN-koden. Detta kan endast lyckas om PIN-koden är "0000".
(se § 6)

Garantibevis

På grundval av våra allmänna affärsvillkor, lämnar vi 2 ÅRS GARANTI för denna apparat, för skador som härrör från material-eller tillverkningsfel. Garanti-tiden startar från inköpsdatum. Garantin omfattar inte:

1. Skador, som uppkommit genom naturlig förslitning (slitdelar, glidytor), överbelastning och olämplig användning (ouppmärksamhet av bruksanvisningen).
2. Skador som uppstått genom våld eller vid transport.
3. Skador på gummidelar, som t ex anslutningskablar. Garantireparationer kommer att utföras endast vid tillverkarens anläggning eller hos auktoriserad verkstad! Tillverkaren reserverar sig rätten, vid försummelse, att avvisa garantikrav.

Apparaten ska för denna avsikt, på ägarens risk, monterad, förpackad och portofritt, återsändas till försäljningsstället tillsammans med originalfakturan och garantibeviset. Så precisa uppgifter som möjligt angående klagomålet är önskvärda. Kostnader i samband med omutiverade klagomål, åligger apparatens ägare.

Elavskräde



Den som använder apparaten är skyldig att avfallshantera den på ett fackmässigt sätt efter dess avslutade användning. Lakta de gällande reglerna i ert land. Apparaten får inte avyttras med hushållsavfall. Inom ramarna för EU-riktlinjerna får avyttring av elektroniska och elektriska apparater ska apparaterna avyttras kostnadsfritt vid kommunala uppsamlingsställen för avfallshantering, eller lämnas in till återanvändningsservice. Regelmässig avyttring stöder miljöskyddet och förhindrar eventuell skadlig verkan på människor och miljö.