

Bruksanvisning

Art. 9027917-18

Ecomatic automatspruta 2 och 5 ml



Automatspruta 2 ml - Art. 9027917

Automatspruta 5 ml – Art. 9027918

Beskrivning: Automatisk doseringspistol. Sprutorna har metallansats, Luer lock ansats, självfyllande dosering och V-fjäder som säkrar jämnt tryck.


Användningsområden: För att injicera vaccin och liknande.

Användning: Sprutorna får endast användas som beskrivet i manualen, all annan användning undanbedes.

Innehåll

Överblick	3
Bruksanvisning	3
Isättning av kanylen:	3
Isättning av slang	4
Dosering:.....	4
Påfyllning:	4
Rengöring och underhåll.....	5
Desificering:.....	5
Smörjning:	5

Överblick

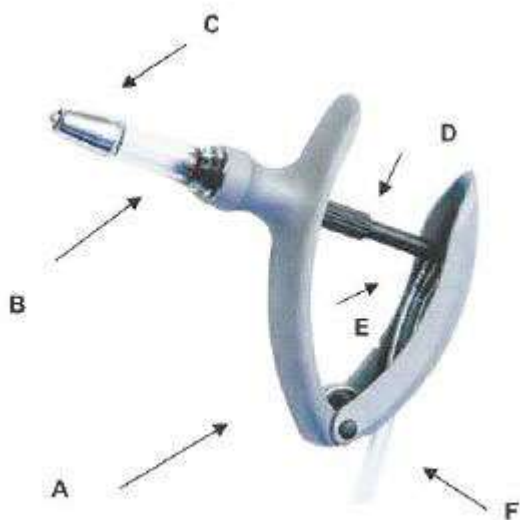

- A. Ergonomisk handtag
- B. Plast cylinder med O-ring och packning
- C. Metall kanylhållare
- D. Doseringsinställning
- E. Slanganslutning
- F. Hål i handtaget där slangen ska löpa igenom.

Bruksanvisning

Utrustningen är fast – endast O-ring och cylinder kan bytas vid behov.

Det är viktigt att sprutan rengörs efter varje användning. Följ tillverkarens rekommendationer när det gäller rengöring/desinfektion.

Isättning av kanylen:

Viktigt:

- Låt skyddshatten sitta kvar på kanylen när det ska fästas (gäller endast engångskanyl).
- Sätt kanylen i Luer Lock ansatsen och vrid den medurs för att låsa fast den.
- Kanylen tas bort genom att vrida den moturs..

Isättning av slang

1. Sätt slangen på sprutans ingångshål.
2. Skjut slangen igenom hålet i handtaget, räta ut slangen.



Dosering:

Vrid doseringsinställningen med eller motsols tills packningen står vid doseringen som är tryckt på cylindern.



Indstilling af dosering

Påfyllning:

1. Avlägsna skyddshatten från kanylen.
2. Håll sprutan med en svag lutning.
3. Tryck in handtaget och släpp det snabbt för att ttrycka in vätska i i cylindern.
4. För att avlägsna luftbubblor från cylindern återuppta processen tills de är borta.

Rengöring och underhåll

Efter användning ska utrustningen rengöras med tvålatten och sköljas ren med varmt vatten.

Viktigt! Om sprutan efter rengöring läcker in luft kan det vara möjligt att en packning i första metallingången har fastnat. Ventilen lossnar genom att slå lite lätt på sprutans första del exempelvis mot en bordskant eller liknande, skölj sedan sprutan med varmtvatten.

Desificering:

Det rekommenderas att desificera både spruta och kanyl efter användning.

1. Rengör sprutan med varmt vatten – använd en flaska med varmt vatten.
2. Lägg sprutan inkl. kanyl i en behållare med vatten och koka i ca. 20 minuter. Det rekommenderas att avmontera cylindern från handtaget och koka sprutan ituplockad.
3. Efter kokning tas delarna upp och torkas torra med en trasa.

Smörjning:

Avlägsna cylindern genom att vrida på den. Smörj packning och glascylinder med 100% ren kallpressad oliv- eller annan motsvarande vegetabilisk olja. Följ leveratörens instruktioner gällande hållbarhet och förvaring.

Använd inte mineralisk olja, silikonolja, WD-40, glycerin eller alkohol. Petroleumsbaserade produkter kommer få packning och O-ring att härda och därmed skada delarna eller förkorta deras livslängd.

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra de tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt